


# ユニフォームに SMART SUIT プラス

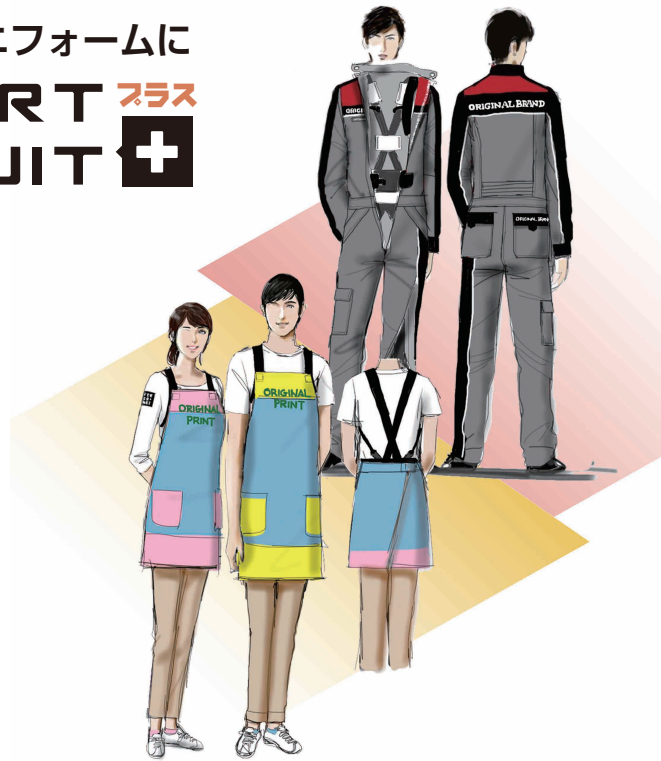

オリジナルデザインのユニフォームを手がける Cloud9 とのアライアンスにより、お使いの作業服にスマートスーツの機能をセッティングして動きやすさやデザイン、安全性を同時に得られるユニフォームをご提案いたします。

## 📞 お問い合わせ

株式会社 スマートサポート

〒060-0061 北海道札幌市中央区南1条西5丁目7番地 愛生館ビル6階  
【TEL】 011-206-1462 【FAX】 011-206-1463


特設 Web ページ



製造管理番号

# スマートスーツ®

## 取扱説明書

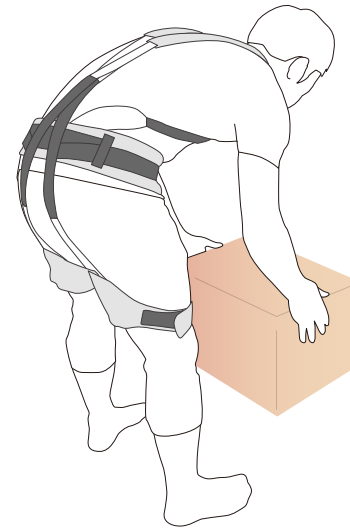

## ⚠️ 注意点

- ・本製品は腰の疾病を治療したり、自分が持てる以上の力は発揮する効果はありませんので、過度な重量物を持ち上げることや、必要以上に負担のかかる姿勢をとることはお避けください。
- ・サポート力には個人差があります。
- ・正しい装着することで軽労化効果を発揮します、裏面の装着方法に従って装着ください。
- ・使用中になんらかの不具合が発症した場合、直ちに使用を中止し医師に相談してください。
- ・摩擦・損傷がある場合や、面ファスナーの接着力が低下した場合は使用しないでください。

## 🛡️ 免責事項

- ・本製品の特許権をはじめとするすべての知的財産権は(株)スマートサポートに帰属します。
- ・本製品の取り扱い・使用には十分に留意し使用によるいかなる損害や体調不良が生じたとしても(株)スマートサポートは一切の責任を負いません。
- ・試験販売品につき製品の素材や仕様、デザインは販売時期によって異なる場合がありますのでご了承ください。

## 👉 装着方法

- 1** 装着前

  - ※肩ベルトの裏面には黒いラインテープがあります。装着前にねじれがないことを確認してください
  - ※ベルト・バックル類が緩んでいることを確認
- 2** 肩ベルトをリュックのように背負い胸のバックルをとめます

  - ※バックルが胸の下に来るよう位置をお確かめください
- 3** 腰バンドを骨盤の上あたりの位置で締めます
- 4** 脚部ベルトを両側の膝上でとめます

  - ※腰ベルトが緩んでいることを確認してから脚部ベルトを下げて、膝上あたりで止めてください
- 5** 腰ベルトの両端を持ちお腹の前に引き出し、次に横にひっぱりベルトを締めます
- 6** 脇ベルトを上半身にフィットするように調整して装着完了です

背中へのベルトがたるまない程度にベルトを調整してください  
作業内容と使用状況に合わせて補助力を適切に調整してご使用ください

## 📋 効果の確認方法

- ☑️ チェックポイント**
- 肩の印(ラベル)の位置が肩の上にある
  - 矢印箇所の距離が取れている
- スマートスーツを正しく装着し、床にある荷物を腰で持ち上げる動作を数回繰り返します
- ↓
- バックル・ベルト類を外し、同じ動作を試みる
- ゴムの張力による上半身の持ち上げ効果とお腹を締めるコルセット効果で腰へかかる負担を軽減されていることがわかるはずですが
- ※腰痛に注意し、無理のない重さでご確認ください

## 📏 サイズ

サイズ	S	M	L	XL
身長	160-166	165-171	170-176	175-185
ウエスト	71-77	75-81	79-90	88-100

## 🧼 洗濯方法

面テープやバックルをとめた状態で、洗濯ネットに入れて中性洗剤で洗ってください

※漂白剤・アイロン・ドライクリーニング・乾燥機には対応していません